

Точное введение Максимальная визуализация

Система введения костного цемента EZFlow



EZflow Cement Delivery System

Система EZFlow создана для точного введения костного цемента и обеспечения максимальной визуализации в ходе выполнения ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ

Уникальные особенности:

- Костный цемент вводится очень точно
- Цветной корпус иньектора позволяет четко видеть остающееся количество цемента
- Высокое качество игл облегчает введение цемента
- Специальная удлинительная трубка позволяет врачу работать на удалении 43 см от зоны выполнения процедуры, уменьшая дозу рентгеновского воздействия
- Надежная, удобная конструкция иньектора. Все компоненты системы не реагируют с составляющими костного цемента

*Облегчает процедуру!
Удовлетворяет пациента!*

Система введения костного цемента EZFlow

Система EZFlow является частью модельного ряда Parallax для чрескожных манипуляций на тканях позвоночника - введения костного цемента (вертебропластики) и заборе костной ткани для исследования

- Костный цемент (с контрастным веществом), разработанный специально для вертебропластики
- Игла Clear-View
- Набор для биопсии Core Assure
- Набор для подготовки пациента к спинальной процедуре



Набор с 1-м инжектором



Набор с 2-я инжекторами

Система EZFlow поставляется в наборе из одного или двух инжекторов с принадлежностями



Высокая точность дозирования цемента

- Один полный поворот ручки инжектора вводит 0,24 костного цемента
- Введение цемента можно прекратить в любой момент
- Емкость для костного цемента имеет большой объем, поэтому не возникает потребности в дозаправке системы или замене ее компонентов
- Точная обработка и сборка всех узлов системы предотвращает утечку цемента и повышает точность его введения
- Система позволяет вводить цемент высокой вязкости без создания зоны чрезмерного давления в зоне введения

Удлинительная трубка пациента

- В комплект системы входит специальная трубка (43,см). позволяющая хирургу находиться дальше от зоны выполнения процедуры, уменьшая дозу рентгеновского облучения
- Трубка облегчает позиционирование системы
- Трубка не создает затруднения для введения всего объема цемента (8мл).

Система введения костного цемента EZFlow

описание	(1) инжектор (1) канюля	(1) инжектор (1) канюля Ромбовидный стилет	(2) канюли Саморезущий стилет	(2) канюли Ромбовидный стилет	(2) канюли 13-го размера Ромбовидный стилет	(2) инжектора (2) канюли	(2) инжектора (2) канюли Саморезущий стилет	(2) инжектора (2) канюли Ромбовидный стилет
кат. №	CDS-100	CDS-112	CDS-120	CDS-122	CDS-132	CDS-200	CDS-2210	CDS-2212

Внимательно изучите инструкцию к набору для уточнения показаний, противопоказаний, мер безопасности и методики применения

За дополнительной информацией обращайтесь: (495) 611-09-77



Эксклюзивный дистрибьютор оборудования Parallax в России:

ЗАО «Санте Медикал Системс»

Москва, ул. Тимирязевская, 1 корп.3

тел. (495) 611 09 77

факс. (495) 786 35 46

E-mail: flp@sante.ru zaslavski@sante.ru

www.sante.ru